

G0708-1
0070-0843

日本製

●サイズ/フリーサイズ(腕輪部周囲30cm、
ベルト長さ45.5cm) ●素材/差剛地・ナイロン、
ポリウレタン、裏剛地・ポリエステル

4531661035095

Dream

〈発売元〉
株式会社 ドリーム
愛知県名古屋市長区徳川町403
I-C-Cクオリティビル
お客様相談室 0120-559-553
URL <http://www.mydream.co.jp/>



アームタイプ (パストアップ姿勢、猫背伸ばし、肩・首・背中・二の腕スッキリ) スリムメンテ・スパイラルベルト 取扱説明書



ご使用になる前に、本書を必ずお読みください。また、
必要な時にご覧になれるよう、大切に保管してください。

一日5分から。くると巻いて動かすだけ。身体のゆがみは、
「ねじれ」ながら進む。だから、ねじり戻す方式のベルト。
気になる姿勢を、美しく整えます。

- 【1】腕リング部 ひじの上で、マークを正面にしてとめます。
- 【2】連結ベルト部 引っ張りながら、ひじの下まで巻きおろします。
- 【3】面テープ部 あまり引っ張らずに、ひじの下で軽く一周してとめます。

【使用方法】

- 写真のように、直接腕に巻く以外に、シャツの上からの着用もできます。
- 2つのベルトの右腕用[赤のRの文字]と左腕用[青のLの文字]をご確認ください。
- [図1]のように、左腕用[青のLの文字]を連結ベルトが垂れ下がるように輪を左手に通して、ひじの上で面テープの青のLマークが正面になるようにして、ずれ落ちないように絞ってとめてください。
- [図2]のように、連結ベルトを引っ張りながら外側から前へ回して、[図3]のように一周させ、ひじの下で、面テープでとめてください。
- その際、連結ベルトをななめにわたす時は引っ張りますが、ひじの下で止める時に一周させ、引っ張らずに軽くとめると、腕の締め付けが弱くなり、長く装着していても疲れにくくなります。
- 同じように、右腕用[赤のRの文字]もつけると、[図4]のようになります。引っ張りの反動で腕が内から外に開き、肩が後ろに下がります。
- 左右をつけ間違えると、肩が前に傾き猫背が強調され、効果がありませんのでご注意ください。



【図1】



【図2】



【図3】



【図4】

【使用上の注意】

- 【スリムメンテ・スパイラルベルト(アームタイプ)】は、商品本来の目的以外での使用はおやめください。
- 使用中、使用後、お体に異常が見られる場合はただちに使用を中止して医師にご相談ください。
- 就寝時のご使用は、お避けください。
- ご使用後は、ベルトを装着した部位に跡が残る場合がございます。
- コンロ、ストーブなどの火気の近く、高温になる場所には置かないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れましたら中性洗剤で手洗いをしていただくと、きれいになります。

